


NOVACUTAN

PARIS • SEOUL • MOSCOW • BRUSSELS

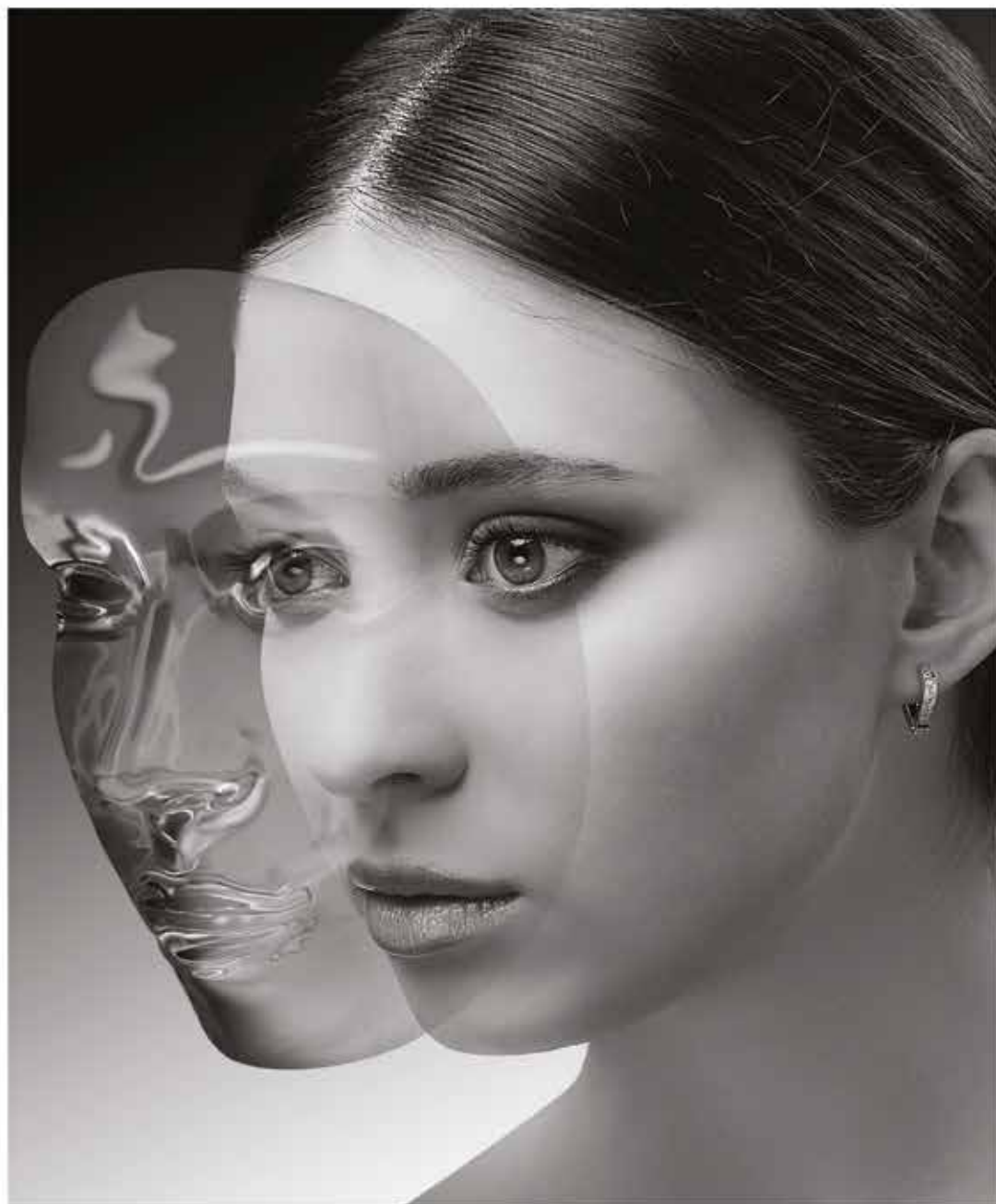

5 степеней защиты для интенсивного омоложения



КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ АППАРАТ M22 + ЭКЗОПРОТЕКТОР NOVACUTAN SBio



БАРАНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА

Врач дерматолог-косметолог, ведущий специалист Premium Aesthetics в области аппаратной косметологии. Специализируется на применении в дермато-косметологии CO2-лазеров, фракционных аблятивных и неаблятивных лазеров, IPL-систем, лазеров для эпиляции и RF-аппаратов.



M22+SBio

процедура 1



3-4 недели

M22+SBio

процедура 1




3-4 недели

M22+SBio

процедура 3



Линии Лангера (натяжение) и Крайсля (морщины)

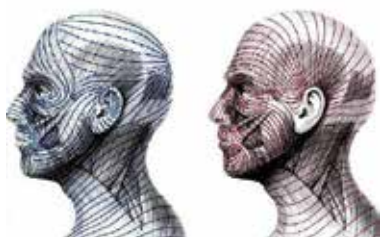

1 ЭТАП

ФОТОТЕРАПИЯ M22

1.1. Фильтр 640 (3 подимпульса)

1.2. Фильтр 590 (3 подимпульса)

1.3. Фильтр 560 (3 подимпульса)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ: 4 недели

КУРС: 3 процедуры

2 ЭТАП

● Экзопротектор: NOVACUTAN SBio

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ: Болюсно

ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ: ПЖК

РАСХОД: 2 мл – 1 шприц/лицо/сеанс

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ: 4 недели

КУРС: 3 процедуры

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗА КУРС: 6 мл

« Протоколы комбинированных, взаимодополняющих инъекционных и аппаратных методов на примере экзопротектора Novacutan SBio и аппарата M22, способны не только подготовить кожу пациента, но и сделать воздействие менее травматичным, уменьшить продолжительность и выраженность реабилитационного периода, снизить риск осложнений и добиться более значительного и продолжительного эффекта. »