


NOVACUTAN

PARIS • SEOUL • MOSCOW • BRUSSELS



БИОФИЛЛЕР

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЕНТУ

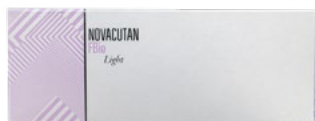

NOVACUTAN FBio

Что необходимо знать перед инъекцией

До процедуры

Введение биофиллера NOVACUTAN FBIO на основе гиалуроновой кислоты может проводиться только врачом дерматокосметологом или пластическим хирургом, прошедшим специальное обучение по применению именно этих препаратов и имеющим соответствующий сертификат. Если Вы страдаете хроническими заболеваниями, склонны к аллергическим реакциям, беременны или кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства, плохо себя чувствуете (простужены) в день процедуры, склонны к образованию рубцов, ранее Вам уже вводились какие-либо препараты в область предполагаемого введения NOVACUTAN FBIO, необходимо обязательно сообщить об этом врачу. Врач примет решение, можно ли Вам вводить препарат.

Во время процедуры

Врач должен в Вашем присутствии вскрыть запечатанную упаковку препарата. Это позволит вам удостовериться в том, что продукт не используется повторно. Затем врач должен сверить и записать в Вашу карту номер партии и срок годности препарата, а так же попросить Вас подписать информированное согласие на проведение процедуры. Желательно сделать фотографии лица в анфас и профиль перед началом процедуры.

После процедуры

Не желательно трогать руками обработанную поверхность в течение первых 6 часов после инъекции, а так же не наносить на эту область какие-либо косметические средства (тональный крем, пудра). В первый день после инъекций не следует посещать бани, солярии, спортивные залы. Следует воздержаться от механического воздействия на зоны введения препарата (массаж, аппаратные косметологические процедуры), так как это может ускорить процесс разрушения препарата. Эстетический эффект от процедуры контурной пластики с использованием NOVACUTAN FBIO на основе гиалуроновой кислоты может длиться до 12 месяцев. Для поддержания стойкого эстетического эффекта на протяжении более длительного периода времени следует использовать всю линию NOVACUTAN. Проводить повторные введения филлеров NOVACUTAN FBIO, а в промежутках между ними рекомендуется улучшать качество и цвет вашей кожи с помощью экзопротектора NOVACUTAN Y/SBIO. А для домашнего ухода использовать Novacutan Full-Face mask или Novacutan Eye filler mask.

